

Test na alkohol ze slin

NÁVOD K POUŽITÍ

1

Testovací proužek



reakční políčko

Před testováním nechte proužek, aby se adaptoval na pokojovou teplotu (15–30°C).


1. Před začátkem testu si nejméně po dobu pátácti (15) minut nekládejte nic do úst. Tím se myslí nealkoholické nápoje, tabákové výrobky, káva, mentolové bonbony, jídlo atd.
2. Otevřete folii a vyjměte testovací proužek. Prohlédněte si reakční políčko na konci proužku. Pokud je před použitím vzorku slin toto políčko modré, test nepoužívejte.

2



3. Naneste sliny do sběrné nádoby

3

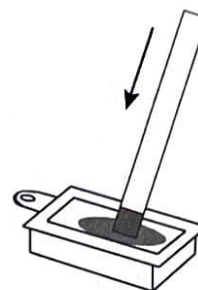

4. Vložte proužek na 6-8 sekund do nádoby se slinami.

4



2 minuty

Výsledek odečtete za **2 minuty**. Porovnejte zbarvení reakčního políčka s barevnou stupnicí na zadní straně obalu testu, čímž můžete určit přibližnou hladinu alkoholu v krvi.



-



0.02%



0.04%



0.08%



0.30%

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ:

Výsledek je pozitivní na přítomnost alkoholu při změně barvy reakčního políčka od světle modré při koncentraci rovnající se 0,02% alkoholu v krvi přes tmavě modrou odpovídající cca 0,08% alkoholu v krvi až po hnědou, která se blíží 0,3% alkoholu v krvi. Test může vykazovat barvy, které budou mezi sousedními políčky barevné stupnice.

Výsledek je negativní

pokud test nevykáže změnu barvy.

Výsledek je neplatný

pokud je reakční polštářek před aplikací slin modrý.

Upozornění: Při výsledku u něhož jsou okraje barevného políčka slabě zbarvené, ale zbytek zůstává bezbarvý, je nutno test zopakovat, aby bylo zajištěno plné nasáknutí polštářku slinami.

Test je na jedno použití.



Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.

#550 Yin Hai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou - 310018,
P.R. China

Autorizovaný zástupce:

MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster
Germany