

2. Frommer, DJ et. al.; Vylepšený screening kolorektálního karcinomu pomocí imunologické detekce okultní krve; British Medical Journal; (1988) 296:1092-1094.
3. Lieberman, D.; Screening/model včasné detekce kolorektálního karcinomu, proč screening? Doplněk proti rakovině; (1994) 74(7):2023-2027.
4. Miller, AB; Epidemiologický pohled na screening rakoviny; Klinická biochemie (1995) 28(1): 41-48.
5. Ransohoff, DF a Lang, CA; Zlepšení okultního krevního testu ve výkalech ; The New England Journal of Medicine; (1996) 334 (3): 189-190.
6. Screening kolorektálního karcinomu – Spojené státy americké, 1992-1993, a nové směrnice; Týdenní zpráva o mobilitě a úmrtnosti; (1995) 45 (5): 107-110.
7. St. John, DJB, a kol.; Vyhodnocení nového testu na okultní krvácení pro detekci kolorektální neoplazie; gastroenterologie; (1993) 104:1661-1668.
8. Yamamoto M., Nakama H., Analýza nákladové efektivity imunochemického screeningu okultní krve na kolorektální karcinom mezi třemi metodami odběru vzorků stolice : Hepatogastroenterology, 2000 březen-duben, 47 (32) 396-399.

REJSTRÍK SYMBOLŮ

	Přečtěte si návod k použití		Spotřebujte do		Obsahuje dostatek pro <n> testy
	pro diagnostické použití <i>in vitro</i>		Číslo šarže		Katalogové číslo
	Omezení skladovací teploty		Výrobce		Nepoužívejte znovu
	Zplnomocněný zástupce				

VivaChek
VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd.,
 Yuhang Economy Development Zone,
 Hangzhou, 311100, China
 Email: info@vivachek.com
 www.vivachek.com

Lotus NL B.V.
 Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,
 2595AA, The Hague, Netherlands.
 Tel: +31644168999
 Email: peter@lotusnl.com

Číslo: 162401900 3
 Datum účinnosti: 2024-11-18

DISTRIBUTOR PRO ČR:

CZECH ORIGINAL PRODUCTS s.r.o.
 Koulova 6, Praha 6, 160 00
 IČ: 08595771, DIČ: CZ08595771

www.joymed.cz
 obchod@joymed.cz
 +420 608 284 065