

Singclean®

CE

COVID-19 Antigen test kit (metoda koloidního zlata)


Přesná

Rychlá

Citlivá



- odhalení antigenu
- masivní testování
- včasné odhalení

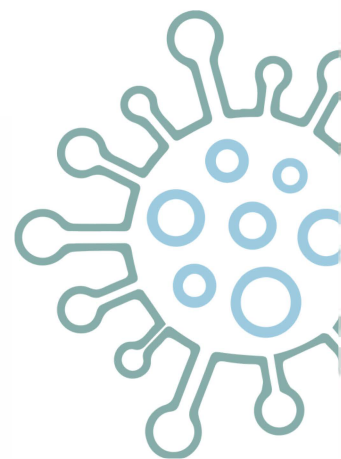

Singclean[®]

COVID-19 Antigen test kit (Metoda koloidního zlata)


► Účel použití

Singclean COVID-19 Test Kit (metoda koloidního zlata) je imunochromatografický test na pevné fázi pro rychlé kvalitativní odhalování antigenu z COVID-19 ve vzorku lidských slin. Tento test poskytuje pouze informativní výsledek, nejedná se o prokazatelnou lékařskou diagnózu. V případě zdravotních obtíží nebo příznaků nemoci se vždy poradte se svým lékařem. Proto musí být jakýkoli reaktivní vzorek s testovací soupravou COVID-19 (metoda koloidního zlata) potvrzen alternativními testovacími metodami a klinickými nálezy.

Tato souprava pro rychlý test antigenu je druhou testovací soupravou vyvinutou společností Singclean Medical pro testování COVID-19 na základě metody koloidního zlata poté, co byla celosvětově v březnu uvedena testovací sada Singclean COVID-19 IgG / IgM Test Kit.

► Hlavní příznaky COVID-19

- Horečka
- Únava
- Kašel
- Dušnost

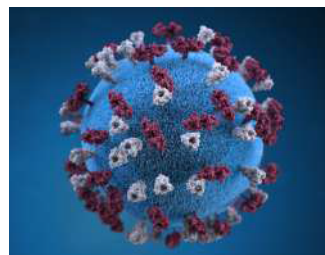

► Funkce

- Výsledek do 15 minut
- Přesný diagnostický nástroj pro aktivní infekci
- Snadný postup a odečtení výsledků
- Dostupné, bez potřeby vybavení, přenosné
- Umožňuje masivní testování

Singclean®

COVID-19 Antigen test kit (Metoda koloidního zlata)

► Porovnání různých testovacích metod pro detekci COVID-19

Singclean®	PCR test nukleových kyselin	Test protilátek	Test antigenů
Klinická hodnota	Diagnóza, zlatý standard	Pomocná diagnóza	Diagnostika a screening
Období testování	Ranná fáze infekce	Pozdní nebo opakovaná fáze infekce	Ranná fáze infekce
Délka provedení	6 hodin	10-15 minut	10-15 minut
Vybavení pro provedení testu	Komplexní laboratoř pro PCR	Není potřeba zvláštní zařízení, pro zdravotníky snadné použití	Není potřeba zvláštní zařízení, snadné použití za dodržení návodu k použití vhodné i pro laiky
Cena	Vysoká	Nízká	Nízká
Požadovaný vzorek	Výtěry ze slin, nosu, úst nebo análu	Plná krev, plazma a sérum	Ze vzorku slin
Uskladnění	chladicí zařízení	pokojeová teplota	pokojeová teplota
Citlivost	Vysoká; ojediněle falešně pozitivní, nepravděpodobně falešně negativní	Mírná; falešně pozitivní i negativní může nastat	Falešně pozitivní výsledek testu je nepravděpodobný. Může dojít k falešně negativnímu výsledku. Výsledek testu lze potvrdit pomocí testování PCR. Ačkoli jsou testy na antigeny méně přesné než testy PCR, jsou levnější a rychlejší.

► Skladování

Soupravu lze skladovat při pokojové teplotě nebo v chladu (4 - 30 °C). Testovací sada je stabilní do data expirace vytištěného na uzavřeném obalu. Testovací sada musí až do svého použití zůstat uzavřena. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Singclean®

COVID-19 Antigen test kit (Metoda koloidního zlata)

► Informace o produktu

Název produktu	Singclean COVID-19 Test Kit
Typ testu	Test antigenů
Princip testu	Metoda koloidního zlata
Typ vzorku	Ze slin
Objem vzorku	3 kapky extrahovaného roztoku (cca 100µl)
Kvalitativní/Kvantitativní	Kvantitativní
Doba trvání testu	15 minut
Teplota během procesu	15-30 °C
Teplota skladování	4-30 °C
Doba použitelnosti (neotevřená)	24 měsíců

► Klinická data

Výpočet citlivosti / specifity / přesnosti ve srovnání s kontrolním činidlem.

Metoda	PCR			
	Pozitivní	Negativní		
Singclean COVID-19 Test Kit	Pozitivní	206	3	209
	Negativní	3	306	309
Celkem		209	309	518
Citlivost	$206/(206+3) \times 100\% = 98.56\%$	95% spolehlivost	95.87% - 99.51%	
Specifita	$306/(3+306) \times 100\% = 99.03\%$	95% spolehlivost	97.18% - 99.67%	
Přesnost	$(206+306)/518 \times 100\% = 98.84\%$	95% spolehlivost	97.50% - 99.47%	

Singclean®

COVID-19 Antigen test kit (Metoda koloidního zlata)

▶ Odběr vzorků a postup testu

Odběr vzorků:

- 1) 30 minut před odběrem slin nejzte, nepijte, nekuřte a nečistěte si zuby.
- 2) Před testováním přiveďte testovací sadu na pokojovou teplotu.
- 3) Odstraňte obal z tyčinky s vatovým tamponem.
- 4) Špičku vatového tamponu držte na jazyku, dokud špička nenasákne slinami (alespoň 2 minuty).



30 minut před odběrem slin nejzte, nepijte, nekuřte, nečistěte si zuby. Odstraňte obal tamponu a špičku tamponu držte na jazyku dokud špička nenasákne slinami (alespoň dvě minuty)


Postup testu

- 5) Vyměňte testovací kazetu z uzavřeného fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve. Nejlepších výsledků bude dosaženo, pokud je analýza provedena do jedné hodiny.
- 6) Umístěte testovací zařízení na čistý a rovný povrch.
- 7) Umístěte zkumavku pro extrakci antigenu na pracovní stůl. Lahvičku s pufrem pro extrakci antigenu umístěte svisle dolů, stiskněte lahvičku, aby pufr volně kapal do extrakční zkumavky, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky, a přidejte 6 kapek (asi 200 ul) do extrakční zkumavky.
- 8) Vložte vatový tampon do extrakční zkumavky obsahující pufr pro extrakci antigenu a vatový tampon otočte asi 10krát, zatlačte hlavu tamponu na stěnu zkumavky, aby se uvolnil antigen v tamponu, a poté ji nechte stát asi 1 minutu.
- 9) Vyměňte vatový tampon z extrakční zkumavky a současně stlačte špičku tamponu tak, aby z tamponu vyteklo co možná nejvíce kapaliny. Použité tampony zlikvidujte v souladu s metodami likvidace biologického odpadu
- 10) Nainstalujte odkapávač na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechejte asi 1 minutu stát
- 11) Otevřete sáček z hliníkové fólie a vyměňte testovací kartu, přidejte 3 kapky (přibližně 100 ul) do otvoru pro vzorek v testovací kartě (nebo pomocí pipety přidejte 100 ul) a spusťte stopky.
- 12) Počkejte, až se objeví barevná čára. Výsledek by měl být přečten za 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut, takový test již může být znehodnocen.


Singclean®

COVID-19 Antigen test kit (Metoda koloidního zlata)

► Průběh testu

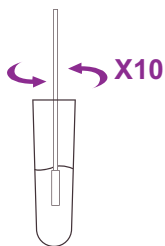

1. Vložte tyčinku do zkumavky s předem přidanými 6 kapkami extrakčního pufru a tyčinku asi 10krát otočte.

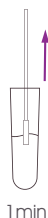

1 min

2. Nechejte tyčinku v extrakční zkumavce po dobu 1 minuty. Odstraňte tyčinku a současně stlačte špičku tyčinky, abyste z tamponu extrahovali kapalinu.



3. Hrot kapátka pevně přitlačte na tubu.



4. Naneste 3 kapky extrahovaného roztoku do jamky na vzorek testovacího zařízení.



15 min

5. Po patnácti minutách odečtěte výsledky.

► Balení

Specifikace	Obrázek	Obsah balení	Karton
20 testů		1 Instrukce 1 Papírová podložka 20 Testovacích sad 20 tamponových tyčinek 20 Extrakčních zkumavek a kapátek 1 Lahvička extrakčního bufferu (5 ml)	600 kusů 650 x 270 x 370 mm (délka x šířka x výška)
1 test/kit		1 Instrukce 1 Testovací sada 1 Tamponová tyčinka 1 Extrakční zkumavka a kapátko 1 Extrakční buffer	400 kusů 520 x 380 x 500 mm (délka x šířka x výška)

Singclean[®]

COVID-19 Antigen test kit (Metoda koloidního zlata)

► Interpretace výsledků testu



Pozitivní:

Pokud se objeví jak kontrolní čárka (C), tak testovací čárka (T), znamená výsledek přítomnost Antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) ve vzorku. Výsledek je pozitivní na COVID-19.

Negativní:

Pokud se objeví pouze kontrolní čárka (C), výsledek ukazuje, že ve vzorku nebyly detekovány žádné antigeny COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledek je negativní na COVID-19.

Neplatný:

Pokud se kontrolní čárka (C) po provedení testu neobjeví, je výsledek považován za neplatný.

Nejpravděpodobnějším důvodem selhání kontrolní linky je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné postupy. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou testovací soupravou.

► Omezení

1. Kdykoli je to možné, použijte čerstvé vzorky.
2. Pozitivní výsledky nevylučují bakteriální infekci ani souběžnou infekci jinými viry.
3. Negativní výsledek může nastat, pokud je množství antigenu COVID-19 přítomného ve vzorku pod detekčními limity testu nebo pokud se nepodařilo odebrat antigen COVID-19 v nosní dutině pacienta.
4. Negativní výsledky nevylučují infekci COVID-19 a neměly by být používány jako konečný nebo jediný základ pro rozhodnutí o léčbě nebo řízení pacienta. Negativní výsledky by měly být brány v úvahu v souvislosti s nedávnými expozicemi pacienta, anamnézou a přítomností klinických příznaků a příznaků shodných s COVID-19. Pro přesnější výsledek testu opakujte testy nebo je potvrďte jinými testovacími metodami a doporučují se klinické nálezy.

► Varování

Optimální výsledek testu vyžaduje přísné dodržování postupu testu popsáno v příbalovém letáku.

Nedostatečný nebo nevhodný odběr, skladování a přeprava vzorků může způsobit nesprávné výsledky testu.



Zaměřeno na zlepšování zdravotní péče